

Bruksanvisning for sementering av kroner, broer, inlays og onlays fra Elysee Dental AS

e.Max Press & e.Max CAD-(lithium discilikat) kroner, broer, inlays og onlays

Alle e.Max Press og e.Max CAD-produkter blir levert flussyretset på sementeringsflaten fra vår produksjon. Styrken i produktet ligger i sementeringen, dvs bindingen til tannsubstansen. For å kvalitets sikre produktet er det derfor helt nødvendig å følge korrekte prosedyrer i forhold til sementeringen av produktet.

Før sementering:

Produktets flussyrebehandling termineres ved prøving på modell og ved innprøving i munnen. De fleste tannleger velger å ta en innprøving av kronen i munnen før sementering. Ved behov for tilpasning må det kun slipes med vannavkjøling ellers kan man risikere fraktur av porselenet. Eventuelle beslipte områder skal poleres godt opp igjen. Etter eventuell innprøving etses sementeringsflaten med 5 % flussyregelè – f.eks. "IPS Ceramic Etching Gel" fra Ivoclar Vivadent. Produsenten av e.Max Press og e.Max CAD - Ivoclar Vivadent – Anbefaler å bonde preppen med Monobond Plus i 60 sekunder før sementering.

Sementering:

Vi anbefaler adhesiv sementering med en resincement. Det minst tekniksensitive er å velge en dualherdende variant. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Zirkonia-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Denne gruppen av produkter omfatter alle zirkoniaprodukter med eller uten ytterporselen. De varmerkene Elysee Dental leverer i denne kategori er: IPS e.Max ZirCad, Forma, Lava, Lava Plus, Procera og Helzirkonia. Zirkoniaprodukter har en naturlig lett

grovhet i strukturen, Dvs. De ikke er polert på sementeringsflaten, og behøver derfor ikke noen ytterligere klargjøring for optimal retensjon.

Før sementering:

Kronen prøves inn i munnen. Ved behov for tilpasning må det kun slipes med vannavkjøling ellers kan man risikere fraktur av porselenet. Eventuelle beslipte områder skal poleres godt opp igjen kronen rengjøres.

Sementering:

Kan sementeres med alle typer sementer. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

Metal- & metalkeramikk-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Alle metalkeramikkprodukter fra Elysee Dental er sandblåst på sementeringsflaten og skal dermed ikke ytterligere forbehandles før sementering.

Før sementering:

Kronen prøves inn i munnen. Ved behov for tilpasning må det kun slipes med vannavkjøling ellers kan man risikere fraktur av porselenet. Eventuelle beslipte områder skal poleres godt opp igjen Kronen rengjøres.

Sementering:

Kan sementeres med alle typer sementer. Følg produsentens bruksanvisning for den valgte sementen.

